

ISORAPID SPRAY

ПРОДУКТ:

ISORAPID SPRAY

Специален- продукт за бърза дезинфекция на медицинско оборудване, цели повърхности и инструменти (по смисъла на директива 93/42/ЕЕС). Може да бъде използван и за други малки повърхности. Без алдехиди. Биоразградимо. Готов за употреба разтвор.

УПОТРЕБА:

Навлажнете цялостно повърхностите и обектите, оставете да подейства, подсушете, ако е необходимо. Преди употреба върху деликатни материали тествайте съвместимостта на продукта с материалите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

• Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM)	30
секунди	
• Туберкулоцидно	30
секунди	
• Хепатит В вкл. HIV	30
секунди:	
• Хепатит С	30
секунди	
• Коронавирус (SARS)	30
секунди	
• Адено вирус	60
секунди	

СЪСТАВ В 100 г.:

20g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.1g quaternary ammonium compounds

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

Прозрачна безцветна течност с характерен аромат.
Точка на възпламеняване : 26°C (DIN 51 755)

плътност (20°C) ~0.906 g/ml (g/cm³)

ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

LD₅₀ – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ:

CE 0483 Germany: DGHM listed

СРОК НА ГОДНОСТ:

-48 месеца от датата на производство.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

R10 Запалимо. R41 Риск от сериозно увреждане на очите. S2 Да се пази от деца S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши S23 Не вдъшвайте ширея. S 25 Избягвайте контакт с очите S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ . S51 да се използва в добре проветриви помещения.

ОПАКОВКИ: УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

450 мл, 950 мл, 2 литра, 5 литра, 10 литра

Инструкции за безопасно поддържане

Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:

По време на работа с продукта може да се отделят запалливи летливи компоненти.

Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха.

Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не пушете.

Изисквания за избора на складово помещение и контейнера

Допълнителни напътствия за условията на съхранение.

Дръжте контейнера плътно затворен.

Съхранявайте при стайна температура.



ISORAPID SPRAY

ПРОДУКТ:

ISORAPID SPRAY

Специален- продукт за бърза дезинфекция на медицинско оборудване, цели повърхности и инструменти (по смисъла на директива 93/42/ЕЕС). Може да бъде използван и за други малки повърхности. Без алдехиди. Биоразградимо. Готов за употреба разтвор.

УПОТРЕБА:

Навлажнете цялостно повърхностите и обектите, оставете да подейства, подсушете, ако е необходимо. Преди употреба върху деликатни материали тествайте съвместимостта на продукта с материалите.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

• Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM)	30
секунди	
• Туберкулоцидно	30
секунди	
• Хепатит В вкл. HIV	30
секунди:	
• Хепатит С	30
секунди	
• Коронавирус (SARS)	30
секунди	
• Адено вирус	60
секунди	

СЪСТАВ В 100 г.:

20g ethanol, 28 g 1-propanol, 0.1g quaternary ammonium compounds

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:

Прозрачна безцветна течност с характерен аромат.
Точка на възпламеняване : 26°C (DIN 51 755)

плътност (20°C) ~0.906 g/ml (g/cm³)

ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:

LD₅₀ – Стойност: >5000 mg/kg
/1/2 летална доза/

РЕГИСТРАЦИЯ:

CE 0483 Germany: DGHM listed

СРОК НА ГОДНОСТ:

-48 месеца от датата на производство.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

R10 Запалимо. R41 Риск от сериозно увреждане на очите. S2 Да се пази от деца S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши S23 Не вдъшвайте ширея. S 25 Избягвайте контакт с очите S26 При контакт с очите измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ . S51 да се използва в добре проветриви помещения.

ОПАКОВКИ: УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:

450 мл, 950 мл, 2 литра, 5 литра, 10 литра

Инструкции за безопасно поддържане

Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:

По време на работа с продукта може да се отделят запалливи летливи компоненти.

Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха.

Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не пушете.

Изисквания за избора на складово помещение и контейнера

Допълнителни напътствия за условията на съхранение.

Дръжте контейнера плътно затворен.

Съхранявайте при стайна температура.

